

Fixadores do protetor facial/face shield

01.07.2020 – versão 1

*Essas orientações podem sofrer alterações

Dentre os protetores faciais/face shield recebemos um tipo que era necessário a fixação com elástico, com troca diária, com isso, solicitamos a indústria confecção de **fixadores próprios higienizáveis e laváveis** para esse modelo:

MODELO DO PROTETOR FACIAL PERMANENTE

PROTETOR FACIAL RÍGIDO INCOLOR

Cód Tasy: 122623



- Pertence ao setor, reutilizável, compartilhada
 - Armazenar no saco plástico
- Validade:** Trocar apenas se necessário, após, desprezar em lixo infectante



Protetor facial/face shield com o fixador aplicado

FIXADOR DE NYLON COM VELCRO

FIXADOR DO PROTETOR FACIAL

Cód Tasy: 124117



TROCA E HIGIENIZAÇÃO DOS FIXADORES

A troca do fixador deve ser realizada se for necessária.

- Com sujidade visível:

Lavar com água e detergente para lavagem do protetor e fixador, conforme orientação já realizada.

- Sem sujidade visível:

Utilizar LabSeptic para desinfecção do protetor e fixador com compressa descartável.

SOLICITAR AO ALMOXARIFADO!

Temos recebido diferentes modelos de protetor facial/face shield para que não falte durante nossa assistência. Comunicaremos se surgirem novos modelos!

Práticas Assistenciais e SCIH

Ramais 6148 e/ou 2637 praticas.assistenciais@accamargo.org.br / sciras@accamargo.org.br