

# Manual para utilização do carro pantográfico

29.06.2020 – versão 1

## Indicações de Uso

O carro pantográfico tem a capacidade de elevação de corpos individuais, sendo possível transportar os corpos com comodidade para as geladeiras verticais.

## Modo de utilização



Para utilizar o carro pantográfico você pode elevar e descer o corpo de forma automática utilizando a alavanca.

1

Destruar as rodas e manobrar o carro pantográfico em frente a geladeira e travar as rodas

2

Abrir a porta da geladeira, elevar o carro pantográfico vazio, para retirar a bandeja da geladeira e colocar sobre o carro pantográfico e descê-lo

3

Transferir (com cuidado) o corpo da maca para a bandeja do carro pantográfico

4

Elevar o carro pantográfico e alinhar a altura do carro com a gaveta a ser utilizada para colocar o corpo

7

Movimentar e guardar o carro em local apropriado, travando suas rodas

6

Descer o carro pantográfico e destravar as rodas

5

Transferir (com cuidado) o corpo do carro pantográfico elevado, para bandeja da geladeira e fechar a porta

**Atente-se**  
sempre ao travamento do carro para evitar quedas do corpo

*Práticas Assistenciais e Manutenção*

Ramais 6148 e/ou 2637 [praticas.assistenciais@accamargo.org.br](mailto:praticas.assistenciais@accamargo.org.br)