

Rotina de reprocessamento das lâminas do videolaringoscópio

19.06.2020

Diante do cenário de pandemia, estamos com dificuldade de comprar as **lâminas do laringoscópio MacGrath**.
Elas são importantes no atual momento pois oferecem precisão no procedimento de intubação.

Dessa forma, as lâminas do videolaringoscópio, que antes eram descartáveis, **passarão a ser reprocessadas pela nossa CME**.
Obedecendo os critérios de segurança para reprocessamento e esterilização.

ESTA É UMA MEDIDA PROVISÓRIA E EMERGENCIAL!

PRÁTICA NOVA PARA REPROCESSAMENTO DAS LÂMINAS



Enfermagem do setor:

As lâminas do videolaringoscópio devem ser encaminhadas a CME, envolvida em saco plástico fechado, imediatamente após o uso;

ATENÇÃO: o videolaringoscópio deve permanecer no setor após desinfecção ser guardado no local recomendado e orientado.

CME:

Esteriliza e devolve para almoxarifado para distribuição para as farmácias.

Almoxarifado:

Disponibiliza para as farmácias.

Farmácias:

Solicita reposição das lâminas ao almoxarifado e disponibiliza para atendimentos dos pacientes.

PROCEDIMENTO DE REPROCESSAMENTO DAS LÂMINAS (Na CME):

- 1) Ao receber, o colaborador da área de limpeza, deverá lavar com água corrente, esponja macia e detergente enzimático;
- 2) Após a limpeza eficaz, secar com ar comprimido e passar álcool 70% com uma compressa macia descartável (*wapper*);
- 3) Passar para a área de preparo, com o auxílio da lupa, verificar a integridade e limpeza;
- 4) Acondicionar em Tyvec, identificar corretamente e inserir o nº da embalagem;
- 5) Após a esterilização na *Sterrad* (Peróxido de Hidrogênio), entregar para os escriturários realizarem a produção e encaminhamento para o almoxarifado.

Estamos à disposição para auxiliar no que for necessário.

Práticas Assistenciais, SCIH, Anestesia e CME

praticas.assistenciais@accamargo.org.br